


トイレに流せるドレインチューブ


いつでも、どこでも、便利です

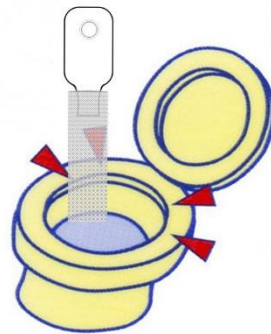

特長

- ◆ オストメイト対応トイレがなくても立ったまま楽な姿勢で排泄処理ができます
- ◆ 跳ね返りや飛散を防ぎ、悪臭を軽減できます
- ◆ 素材はすべて水溶性なので、使用後はそのままトイレに流せます
- ◆ 微生物分解式の山岳トイレでも使用することができます
- ◆ 電車・飛行機・フェリー・長距離バスなど揺れるトイレでも利便性を発揮します
- ◆ 海水でも溶けるのでヨットやクルーザーのトイレでも使用できます
- ◆ 土に埋めても短期間で生分解され、環境に負荷を与えません
- ◆ トイレの水流で完全に溶解するので、下水管が詰まる恐れはありません

使用方法

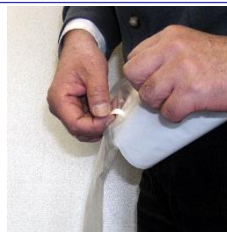

使用後はトイレに流すだけ

1. ストーマパウチの下部開放部をドレインチューブに挿入します
2. 裏面の両面テープを剥がしパウチと接合します
3. 先端を便器内に垂らし、ストーマパウチの開放部を開きます
4. パウチが空になったら、ドレインチューブをトイレに流します
(両面テープも水溶性なので、そのままトイレに流せます)

使用上の注意

- ◆ 斜めにして使用しないでください。【排泄物が垂直に落ちるように使用してください】
- ◆ 湿気のない場所で、常温で保管してください
- ◆ 水に濡れた手で触らないでください
- ◆ 口に含むと溶けてしまいます。幼児の手の届かない場所で保管してください。
(有害物質ではありませんが、万一、幼児が食べてしまった場合はすぐに医師の診断を受けてください)

商品明細

商品名	オストメイト用ドレイン・チューブ DT101
サイズ	13cm x 45cm
素材	水溶性・生分解性PVAフィルム
価格	1,500円/30枚入り (水溶性テープ付き) (非課税)
	1,200円/30枚入り (テープ無し) (非課税)

日本製

製造発売 有限会社イースタウン
〒604-8424 京都市中京区西ノ京樋ノ口町10
TEL 075-354-6181 FAX 075-354-6182
www.easttown.co.jp e-mail:info@easttown.co.jp